

## FAQ-Liste für Hand-Bike-City-Kid

<b>Problem</b>		<b>Lösungen</b>
<b>Anbauständer</b>	klappbar	Nicht erforderlich, Ständer so einstellen, das sie neben den Vorderrädern stehen.
<b>Automatikeinraster</b>	für was sind sie da	Zum hochheben der kleinen Rollstuhlvorderräder
<b>Berguntersetzung</b>	was ist das	Ein in die Kurbeleinheit eingebautes Untersetzungsgetriebe was die Gänge 2,5 fach untersetzt
<b>Gangschaltung Nabe</b>	leichter Ölaustritt	Ohne Bedeutung
<b>Kette springt ab</b>	zu locker	Beide Muttern an der Achse lösen und an den Kettenspanner die Muttern anziehen, bis die Kette gespannt ist.
<b>Kurze Kurbeln</b>		An allen Hand Bikes möglich
<b>Positionsklemmen Fix</b>	was bewirken diese	Sie werden am Rollstuhl angebracht und gewährleisten die immer gleiche Anklemposition
<b>Rollstuhl Model</b>	extra Rollstuhl erforderlich	Nein; Stricker Hand Bikes sind an fast jeden Rollstuhl ohne Umbauten adaptierbar, bei Kid Rollis haben wir spezielle Anbauhilfen, die einmalig angebracht werden
<b>Rücktrittbremse</b>	an welchen Hand Bikes ist eine Rücktrittbremse möglich	An allen mit Ketten- oder Zahnriemenantrieb
<b>Schutzhelm</b>	ist das tragen vorgeschrieben	Nein, wie beim Fahrradfahrer empfohlen
<b>Tachometer</b>	keine Anzeige bzw nur Uhrzeit	-Keine Anzeige Batterie wechseln - Wenn nur Uhrzeit erscheint, wie folgt vorgehen: Tacho richtig auf den Halter stecken Magnetgeber und Sensor am Rad auf max. 1-3 mm Abstand einstellen Federschuhe am Halter (Gegenstück vom Tacho) auf richtigen Sitz prüfen wenn das nicht zum Erfolg führt, ist das Kabel defekt und es muss ein neuer Tacho angebaut werden.
<b>Umkippen</b>		Bei Kurvenfahrt mit dem Körper in die Kurve legen Umkippen des Hand Bikes nach hinten wegen des Bikes so gut wie ausgeschlossen
<b>Vorfürungen</b>	werden Hand Bikes Vorfürungen gemacht	Ja, näheres bitte in Bühl erfragen